

mectron



▶ accendi l'innovazione





WE ♥ PROPHYLAXIS

air-polishing

▶ STARJET*

■ dimentica i limiti

Situazione tipica: hai terminato il trattamento sopragengivale con il dispositivo air-polisher con innesto rapido per turbina. Devi ora eseguire la rimozione del biofilm sottogengivale, ma il tuo apparecchio non lo permette.

▶ inizia con la flessibilità

Con STARJET scopri la massima versatilità: un unico dispositivo per gestire tutte le polveri Mectron di diversa granulometria. Selezione del tipo di trattamento tramite un'esclusiva ghiera girevole per una profilassi completa sopra e sottogengivale. Non ti basta? scegli il terminale più adatto a te tra tre opzioni disponibili.



120°

PERIO

90° (optional)

▶ 3 terminali differenti

I terminali da 90 e 120° garantiscono un accesso ottimale a tutte le tasche parodontali fino a 5 mm di profondità.

Il terminale PERIO viene fornito con puntali sottogengivali sterili dedicati alle tasche parodontali oltre 5 mm.

Si connettono con un semplice click grazie ad un esclusivo sistema di sicurezza a baionetta.



▶ puntale sottogengivale PERIO

Flessibile, morbido e anatomicamente adattabile alla tasca parodontale, il puntale PERIO è monouso e viene fornito sterile. Inseribile manualmente e rimovibile con apposita chiave.



▶ ghiera esclusiva per selezionare il tipo di polvere

Massima versatilità: un unico dispositivo per una profilassi completa sopra e sottogengivale.



▶ camera della polvere trasparente

Per una visibilità ottimale del livello di polvere.

▶ facile riempimento

Caricamento più facile grazie all'apertura laterale. Nessun rischio di fuoriuscite accidentali.



▶ 7 differenti attacchi per turbina

- Bien-Air UNIFIX® e UNIFIX® L
- KaVo MULTIFLEX® e MULTIFLEX® lux
- SIRONA® R e B
- W&H® ROTO QUICK® e ROTO QUICK® lux
- NSK® MACHLITE® e PHATELUS®
- Midwest
- Borden



POLVERI PER AIR-POLISHING

■ dimentica le scelte difficili

La gamma di polveri per uso odontoiatrico è pressoché illimitata. Come riuscire a trovare quella che può darti i migliori risultati?

► inizia con la scelta giusta

Ecco un suggerimento: affidati alla ben nota qualità Mectron per i trattamenti di air-polishing. Grazie alla nostra ricerca sono state sviluppate speciali particelle di polvere dalle qualità idrofobiche che evitano intasamenti e garantiscono un risultato eccellente.⁹⁻¹⁶

INDICAZIONI	SOFT ^M SOFT ^L	SENSITIVE ⁺
RIMOZIONE BIOFILM SOPRAGENGIVALE	●	●
RIMOZIONE PIGMENTAZIONI ESTRINSECHE	●	
RIMOZIONE BIOFILM SOTTOGENGIVALE		●
DETOSSIFICAZIONE TASCHE PARODONTALI		●
MANTENIMENTO IMPLANTARE		●
TRATTAMENTO PERIMPLANTITI		●
TRATTAMENTO BRACKETS ORTODONTICI	●	●
APPLICAZIONE SU PROTESI FISSE E RESTAURI		●
MANTENIMENTO OTTURAZIONI IN COMPOSITO	●	●



- PROPHYLAXIS POWDER SOFT^M
- PROPHYLAXIS POWDER SOFT^L

rimuovono efficacemente e in maniera delicata il biofilm batterico sopra-gengivale e le macchie sulla superficie dello smalto (a base di bicarbonato di sodio; granulometria 55 µm)

Indicazioni:

- Rimozione delle macchie tenaci dovute a tabacco o ad altre sostanze pigmentanti
- Detersione di solchi e cavità
- Trattamento dei pazienti ortodontici



- PROPHYLAXIS POWDER SENSITIVE⁺ – GLYCINE POWDER

rimuove efficacemente il biofilm batterico sopra e sottogengivale (a base di glicina; granulometria 25 µm)

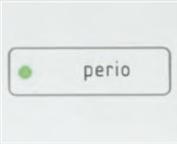
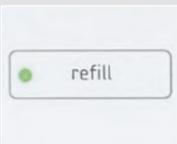
Indicazioni:

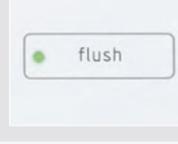
- Rimozione delle discromie estrinseche lievi
- Detossificazione delle tasche parodontali
- Mantenimento parodontale
- Mantenimento implantare e trattamento delle perimplantiti
- Detersione dei brackets ortodontici
- Delicata sui materiali da restauro e sulle superfici radicolari esposte
- Diminuisce la carica batterica nel cavo orale
- Può essere usata in tutte le tipologie di pazienti

* PROPHYLAXIS POWDER SOFT^L e SOFT^M sono registrate e prodotte da SPEIKO - Dr. Speier GmbH, Walther-Rathenau-Str. 59, 33602 Bielefeld, Germany
PROPHYLAXIS POWDER SENSITIVE⁺ è registrata e prodotta da PRISMAN GmbH, Otto-Hahn-Ring 6-18, 64653 Lorsch, Germany

LEGENDA

	PANNELLO DI CONTROLLO TOUCH <ul style="list-style-type: none"> comandi ergonomici facile da pulire 
	UTILIZZO SOPRAGENGIVALE Per una confortevole detersione sopragengivale. 
	UTILIZZO SOTTOGENGIVALE Per una delicata detersione della superficie sottogengivale, dei materiali da restauro e della superficie implantare. 
	PUNTALE SOTTOGENGIVALE PERIO Per una delicata decontaminazione delle tasche parodontali con profondità superiore a 5 mm. Il puntale sottogengivale dedicato - monouso e sterile - si inserisce manualmente con un semplice click. 
	CONTENITORI POLVERE ESTRAIBILI Contenitori polvere facilmente estraibili per ottimizzare le operazioni di manutenzione. 
	SISTEMA ESCLUSIVO ANTI-INTASAMENTO Le tubature interne rimangono sempre libere grazie ad un leggero e costante flusso d'aria. 

	FUNZIONE PERIO Riduce la pressione per un trattamento sottogengivale sicuro ed efficace. 
	MANIPOLI AIR-POLISHING <ul style="list-style-type: none"> si inseriscono con un semplice click completamente sterilizzabili, ruotabili di 360° la polvere e l'acqua vengono convogliate separatamente l'acqua avvolge il getto di polvere e di aria ed impedisce la formazione di una nube di polvere 
	COPERCHIO PER LA CAMERA DELLA POLVERE TRASPARENTE Controllo costante del livello di polvere. 
	IMPUGNATURA ERGONOMICA Per un semplice avvitarlo del coperchio della camera della polvere. 
	FUNZIONE REFILL Permette di rimuovere facilmente i contenitori della polvere per ottimizzare le operazioni di manutenzione senza dover spegnere il dispositivo. 

	FUNZIONE CLEAN/FLUSH Un pulsante aziona la funzione automatica di pulizia delle linee aria e acqua. 
	CONTROLLO DELLA PRESSIONE <ul style="list-style-type: none"> permette una pressione del getto d'aria tra 4 e 8 bar permette una pressione del getto d'acqua tra 1 e 6 bar 
	SEPARATORE DI CONDENZA Elimina gran parte della condensa liquida presente nel sistema d'aria compressa. 
	FILTRO PER L'ACQUA <ul style="list-style-type: none"> previene il passaggio delle particelle sospese si pulisce senza l'impiego di strumenti particolari 
	TEMPERATURA DELL'ACQUA L'acqua viene riscaldata ad una confortevole temperatura fisiologica. 
	IRRIGAZIONE CON FLACONE <ul style="list-style-type: none"> possibilità di utilizzare diverse soluzioni medicamentose e farmacologiche posizione verticale (nessun rischio di perdite) facile da connettere 

LEGENDA

	MANIPOLO LED <ul style="list-style-type: none"> ultraleggero. Peso di soli 55 g. illuminazione ottimale per una massima visibilità riduce "l'effetto nebbia" causato dalla luce a contatto con il fenomeno di cavitazione dell'irrigazione 
	SOFT MODE La funzione SOFT MODE di Mectron riduce l'ampiezza delle oscillazioni permettendo un movimento dell'insero delicato ma efficace. In questo modo i pazienti affrontano con molta più tranquillità i trattamenti a cui vengono sottoposti con grande beneficio anche per l'operatore. 
	POTENZA PULSATA Con questa funzione la consueta onda sinusoidale creata dall'oscillazione degli ultrasuoni (funzione standard), viene trasformata e caratterizzata da specifici picchi di potenza che si rivelano ottimali nelle preparazioni protesiche. 
	APC (AUTOMATIC PROTECTION CONTROL) <ul style="list-style-type: none"> riconosce eventuali malfunzionamenti arresta ultrasuoni ed irrigazione in meno di 0,1 secondi una spia di controllo si accende immediatamente 
	SISTEMA DI FEEDBACK <ul style="list-style-type: none"> precisa e costante sintonizzazione tra manipolo ed inserto rileva e regola automaticamente la potenza necessaria secondo il tipo di trattamento l'intervento dell'operatore si limita all'azionamento del pedale 

► MECTRON S.P.A.

via Loreto 15/A, 16042 Carasco (Ge), Italia
tel +39 0185 35361, fax +39 0185 351374
www.mectron.it, mectron@mectron.com



© Copyright Mectron S.p.A., Carasco, Italia
Tutti i diritti riservati. Testo, immagini e grafica delle brochure Mectron sono protetti dai diritti d'autore e da altre leggi sui diritti di proprietà.
Senza autorizzazione scritta di Mectron S.p.A. il contenuto non può essere copiato, divulgato, modificato o reso accessibile a terzi a scopi commerciali.
Si prega di consultare le etichette e il manuale d'uso dei prodotti per eventuali indicazioni, controindicazioni, pericoli, avvertenze e precauzioni.
Si prega di contattare il distributore locale per verificare la disponibilità dei prodotti.



I prodotti seguenti sono stati registrati secondo il regolamento MDR 2017/745. Per motivi di tipo grafico, il carattere dei nomi dei prodotti potrebbe variare. I nomi dei prodotti registrati sono conformi al seguente elenco:

• combi touch	COMBI touch	• COMPACT PIEZO P2K	COMPACT PIEZO P2K
• starjet	STARJET	• starlight uno	STARLIGHT UNO
• SUBGINGIVAL PERIO TIPS	Puntale sottogengivale perio	• starlight pro	STARLIGHT PRO
• multipiezo	MULTIPIEZO	• starlight s+	STARLIGHT S+
• MICROPIEZO	MICROPIEZO	• starlight sx5	STARLIGHT SX5
• COMPACT PIEZO LED	COMPACT PIEZO LED		